

耳の聞こえにくい方に、難聴者の方に

三重県総合文化センターでは 赤外線補聴システムが利用できます ※1


専用受信機等を貸し出しています ※2

補聴器(T回路付)を使用されている方もご使用になれます

専用受信機の貸出場所
施設利用サービスセンター
(文化会館棟 1階)



赤外線補聴システムのしくみ

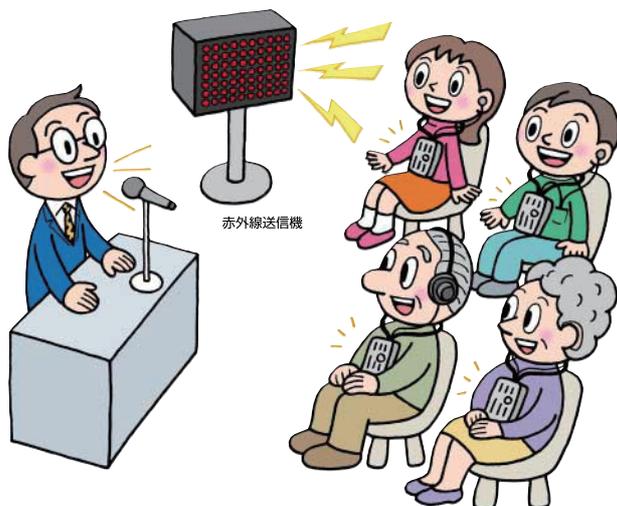

このシステムは、客席内に設置された赤外線送信機より、舞台上の音声や映像の音声などを送り、専用受信機によってこの音声を聞くことができます。

次の使用方法(フィッティング)から選べます

受信機使用方法

- 1.右図の使用方法から自分にあった方法を選び、専用受信機の受光部を前にして首からかけてください。
- 2.補聴器使用の場合は、補聴器のスイッチを「T」または「MT」にして、回路を切り替えてください。
- 3.電源スイッチをONにしてください。
電源ランプが点灯します。
- 4.音を聞きながら音量ボリュームを調整してください。

ご注意

- 1.受信機の受光部(レンズ)を覆わないでください。
受光部が隠れると雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。
- 2.催事内容によっては無音の場面があります。
ボリュームの調整にお気を付けてください。
- 3.赤外線照射エリア外ではザー音が入ることがありますが、故障ではありません。



専用受信機

ヘッドホンで

補聴器を持たない高齢者の方や、「T・MTスイッチ」の無い補聴器をお持ちの方へ。

インダクターで

インダクターを首にかけてください。
補聴器のスイッチを「TまたはMT」に切り替えて使用します。
(ヘッドホンジャックに接続して使用します)

インダクターで

(シルエットインダクター使用)

インダクターを耳にかけてください。
補聴器のスイッチを「TまたはMT」に切り替えて使用します。
(耳かけ型またはポケット型補聴器に適します)